

1·DAY ACUVUE®

TruEye™

BRAND CONTACT LENSES

Noszenie dzienne, jednorazowe
Instrukcja Pacjenta














Jednodniowe soczewki kontaktowe

Johnson & Johnson

CE
0086

Poniższe symbole mogą wystąpić na naklejkach lub na opakowaniach soczewek kontaktowych 1•DAY ACUVUE® TruEye™ z filtrem UV i jasnoniebieskim zabarwieniem.

SYMBOL	DEFINICJA	SYMBOL	DEFINICJA
	Patrz Instrukcja Pacjenta		Symbol certyfikatu jakości
	Użyj do dnia (data ważności)		Filtr UV
	Nr serii		Tu otwierać
	Sterylizacja parą wodną lub gorącym powietrzem		Opłacona utylizacja odpadów
DIA	Średnica		Uwaga: Federalne prawo USA ogranicza sprzedaż tych wyrobów
BC	Promień krzywizny tylnej		
D	Dioptria (moc soczewki)		
	Jasnoniebieskie zabarwienie Prawidłowo założona soczewka		Jasnoniebieskie zabarwienie Źle - soczewka wywinięta

Spis treści

Soczewki kontaktowe 1•DAY ACUVUE® TruEye™	4
Ostrzeżenia – co należy wiedzieć o noszeniu soczewek kontaktowych	6
Rutynowa higiena	7
Opakowanie soczewek	8
Posługiwanie się soczewkami	9
Zakładanie soczewek	10
Centrowanie soczewki	12
Postępowanie z przyklejoną (nieruchomą) soczewką	13
Zdejmowanie soczewek	14
Dbanie o soczewki	16
Monowizja	18
Samokontrola	19
Inne ważne informacje	20
Podsumowanie	22
Reakcje odrzucenia	23
Karta kontrolna	25

Soczewki kontaktowe 1•DAY ACUVUE® TruEye™

Komfortowe, wygodne

Gratulujemy Państwu wyboru soczewek 1•DAY ACUVUE® TruEye™ firmy Johnson & Johnson – światowego lidera w produkcji soczewek kontaktowych.

Soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ są miękkie, cienkie i elastyczne. To powoduje, że są one komfortowe już od pierwszych chwil noszenia i zapewniają dopływ tlenu do oczu, pomagając zachować je w świeżości i zdrowiu. Dodatkowo chronią przed promieniowaniem ultrafioletowym (UV).*

Dla ułatwienia zakładania soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ mają jasnoniebieskie zabarwienie oraz wskaźnik strony (1 2 3).

Przełomowa technologia umożliwia wyprodukowanie wysokiej jakości soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ wprowadzając materiał o zaawansowanych właściwościach do soczewki wymienianej codziennie. Oznacza to, że wymieniacie Państwo swoje soczewki zanim pojawią się zanieczyszczenia, a proces starzenia spowoduje obniżenie jakości noszenia soczewek. Zatem utrzymujecie Państwo stale doskonały poziom komfortu, jakości widzenia i zdrowia. Od kiedy każda soczewka w procesie produkcji jest identyczna, mogą Państwo stale doświadczać tego samego doskonałego komfortu i jakości widzenia każdego dnia.

Tak jak wszystkie soczewki kontaktowe, soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ są materiałem medycznym. Regularne wizyty kontrolne i stała opieka specjalisty są niezbędne dla długoterminowej ochrony zdrowia i wzroku.

1•DAY ACUVUE® TruEye™ są przeznaczone do jednorazowego noszenia dziennego, jak zalecił specjalista. Zawsze postępuj według wskazań specjalisty.

Soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ pomagają chronić rogówkę i wnętrze oka przed szkodliwym promieniowaniem UV*.

UWAGA:

Długotrwała ekspozycja na promieniowanie UV jest jednym z czynników zwiększających ryzyko wystąpienia zaćmy. Jest to zależne od warunków naturalnych (szerokość geograficzna, ukształtowanie terenu, zachmurzenie) od czynników indywidualnych (długość i rodzaj czynności wykonywanych na świeżym powietrzu). Mimo, że soczewki kontaktowe z filtrem UV pomagają chronić oczy przed szkodliwym promieniowaniem ultrafioletowym to ich efektywność w zapobieganiu i redukcji schorzeń oczu nie została dotychczas odpowiednio udokumentowana. W celu uzyskania szczegółowych informacji skonsultuj się ze specjalistą.

*OSTRZEŻENIE: Soczewki z filtrem UV nie zastępują okularów ochronnych, (takich jak gogle czy okulary przeciwsłoneczne) blokujących szkodliwe promieniowanie UV, ponieważ nie zakrywają one całkowicie oczu i ich okolic.

Ostrzeżenia – co należy wiedzieć o noszeniu soczewek kontaktowych



Pacjenci chcący bezpiecznie nosić soczewki kontaktowe muszą przestrzegać zaleceń specjalisty w zakresie ich użytkowania.

Niewłaściwe stosowanie soczewek kontaktowych może prowadzić do poważnego uszkodzenia oczu.

Czasami choroby oczu, w tym owrzodzenia rogówki, mogą rozwinąć się i doprowadzić do utraty wzroku. Wyniki badań są następujące¹:

Średnia roczna częstość występowania wrzodziejącego zapalenia rogówki u osób noszących soczewki kontaktowe w trybie dziennym jest oceniana na około 4,1 na 10 000 osób i na około 20,9 na 10 000 u osób stosujących soczewki w systemie przedłużonego noszenia (bez zdejmowania na noc).

Przedłużone noszenie soczewek kontaktowych obarczone jest 4 do 5 razy większym ryzykiem wystąpienia owrzodzenia rogówki w porównaniu z noszeniem dziennym.

Wykluczając z porównania użytkowników soczewek w trybie dziennym noszących je czasem przez całą dobę oraz użytkowników soczewek w trybie przedłużonym zdejmujących je czasem na noc, ryzyko to jest 10 do 15 razy większe u noszących soczewki bez zdejmowania na noc, niż u noszących soczewki tylko w dzień.

Ryzyko wrzodziejącego zapalenia rogówki podczas noszenia soczewek w trybie przedłużonym rośnie wraz ze wzrostem kolejnych dni, gdy soczewki noszone są bez zdejmowania.

Ryzyko owrzodzenia rogówki jest 3 do 8 razy większe u palaczy niż u osób niepalących.

Ryzyko wystąpienia wrzodziejącego zapalenia rogówki można zmniejszyć przez dokładne przestrzeganie higieny oraz zasad użytkowania soczewek kontaktowych, włączając czyszczenie pojemniczka na soczewki.

¹ New England Journal of Medicine, September 21, 1989; 321 (12), pp. 773-783.

Rutynowa higiena

Przygotowanie do założenia soczewki

Czystość jest pierwszym i najważniejszym aspektem prawidłowego postępowania z soczewkami kontaktowymi.

Rutynowo utrzymuj wzorcową higienę przy posługiwaniu się soczewkami kontaktowymi.

- Zawsze przed dotknięciem soczewek dokładnie myj ręce łagodnym mydłem, spłukuj obficie wodą i wycieraj ręcznikiem nie pozostawiającym pyłków.
- Przed dotknięciem soczewek nie używaj kosmetyków na bazie tłuszczów, odżywek czy kremów. Najlepiej założyć soczewki przed zrobieniem makijażu. Kosmetyki na bazie wody są bardziej neutralne dla soczewek niż kosmetyki na bazie tłuszczów.
- Zamykaj oczy przy stosowaniu lakieru do włosów czy innych aerozoli.
- Skonsultuj ze specjalistą możliwość noszenia soczewek w czasie uprawiania różnych dyscyplin sportowych lub rekreacyjnych, włączając pływanie i inne sporty wodne.
- Zawsze postępuj zgodnie z niniejszą instrukcją i zaleceniami specjalisty w zakresie odpowiedniego zakładania, zdejmowania, czyszczenia, dezynfekcji i przechowywania soczewek kontaktowych.
- Nigdy nie noś soczewek dłużej niż przez przepisany okres.



**Codziennie świeże,
nowe soczewki**



Opakowanie soczewek

Aby otworzyć opakowanie zbiorcze – kartonowe pudełko, należy poderwać klapkę umieszczoną na jego przedniej stronie. Wewnątrz znajduje się 30 soczewek w 6 paskach po 5 soczewek w każdym.

Każda soczewka ma indywidualne opakowanie zapewniające jej sterylność. Wsuwając klapkę z powrotem, zamykamy opakowanie zbiorcze.

NIE WOLNO zakładać soczewek w przypadku, gdy indywidualne opakowanie soczewki jest zniszczone lub otwarte.

Aby otworzyć indywidualne opakowanie soczewki należy:

- 1** Oddzielić jedno indywidualne opakowanie od paska pięciu soczewek. Należy zrobić to bardzo ostrożnie, aby nie uszkodzić soczewki ani innych indywidualnych opakowań w pasku.
- 2** Wstrząsnąć opakowaniem indywidualnym, aby soczewka swobodnie pływała w płynie.
- 3** Odebrać folię zamykającą. Może się zdarzyć, że soczewka przyklei się do folii bądź do pojemniczka. Nie ma to wpływu na sterylność soczewki, która wciąż doskonale nadaje się do użycia.
- 4** Należy dotykać soczewkę jedynie końcami palców, a nie paznokciami, które mogą uszkodzić soczewkę. Dlatego paznokcie powinny być krótkie o gładkich brzegach.
- 5** Ostrożnie wyjąć soczewkę, wysuwając ją wzdłuż łagodniejszego skosu pojemniczka. Nigdy nie wolno używać pęsety i innych narzędzi.

Posługiwanie się soczewkami

- Aby uniknąć pomyłek, najlepiej jest zawsze zakładać soczewki zaczynając od prawego oka.
- Przed założeniem obejrzyj soczewkę, upewnij się, że nie ma rozdarć ani wyszczerbień. Jeżeli soczewka wygląda na uszkodzoną, wyrzuć ją i użyj następną.
- Upewnij się, że soczewka nie jest wywinięta na drugą stronę.
- W tym celu połóż soczewkę na palcu wskazującym, podnieś do góry na wysokość oczu i patrząc pod światło oceń jej kształt. Soczewka powinna mieć naturalny, kulisty kształt.

Dla 1•DAY ACUVUE® TruEye™



UŁATWIENIA:

Posługiwanie się soczewką 1•DAY ACUVUE® TruEye™ jest łatwiejsze, jeśli pozwoli się jej trochę przeschnąć: połóż soczewkę na suchym palcu i potrzymaj ją tak przez 5–10 sekund.

NIE UŻYWAJ płynów do soczewek z tym produktem.

Nie testowano soczewek 1•DAY ACUVUE® TruEye™ z płynami.

Soczewka raz wyjęta z oka powinna zostać wyrzucona.

Zakładanie soczewek

1. Pamiętaj! Zakładanie soczewek zaczynaj zawsze od prawego oka.
Sprawdź czy soczewka nie jest wywinięta na drugą stronę.
2. Połóż soczewkę na opuszku palca wskazującego. Środkowym palcem tej samej dłoni odciągnij delikatnie w dół dolną powiekę.
3. Palcem wskazującym lub środkowym drugiej dłoni przesuń górną powiekę w górę i połóż soczewkę na oku.
4. Delikatnie opuść powieki i mrugnij.
5. W ten sposób załóż soczewkę na lewe oko.

Istnieją również inne metody zakładania soczewek kontaktowych.

Jeżeli powyższa metoda wydaje Ci się zbyt trudna, specjalista może zaproponować Ci inną.



Centrowanie soczewki

Zwykle po założeniu soczewka automatycznie ustawia się w pozycji centralnej. Czasem w trakcie zakładania, bądź znacznie rzadziej w trakcie noszenia, soczewka przemieszcza się na białą część oka. Może się to przydarzyć przy nieodpowiednim sposobie zakładania i zdejmowania soczewek.

Aby ustawić soczewkę w pozycji centralnej, należy postępować zgodnie z jedną z poniższych metod:

- Zamknij oko i delikatnie przez zamkniętą powiekę wmasuj soczewkę na prawidłowe miejsce.

lub

- Przy otwartym oku, delikatnie uciskając palcem brzeg górnej lub dolnej powieki, przesuń zdecentrowaną soczewkę na centralną część oka.

UWAGA!

Jeżeli po założeniu soczewki obraz jest zamazany, sprawdź:

- Czy soczewka jest ustawiona w pozycji centralnej (patrz powyżej),
- Jeśli soczewka znajduje się we właściwej pozycji, zdejmij ją i sprawdź, czy:
 - a. na soczewce nie ma zabrudzeń (kosmetyki, tłuszcz);
jeśli tak, wyrzuć ją i załóż świeżą;
 - b. soczewka jest założona na właściwe oko;
 - c. soczewka nie jest wywinięta na drugą stronę;
będzie wtedy mniej wygodna w noszeniu.

Postępowanie z przyklejoną (nieruchomą) soczewką

Jeżeli soczewka przestaje poruszać się po oku, należy użyć kropli nawilżających zaleconych przez specjalistę. Możesz też nawilżyć swoje soczewki w czasie noszenia, aby stały się bardziej komfortowe.

Jeśli soczewka przyklei się do oka, wpuść kilka kropel płynu zwilżającego i zaczekaj, aż zacznie się swobodnie poruszać. **Jeżeli po upływie kilku minut soczewka jest nadal nieruchoma, NATYCHMIAST skontaktuj się ze specjalistą.**



Zdejmowanie soczewek

- Zawsze zdejmuj soczewki w tej samej kolejności.
- Dokładnie umyj, opłucz i wysusz ręce oraz postępuj zgodnie z zasadami opisanymi wcześniej w rozdziale „Rutynowa higiena”.

UWAGA:

Zawsze zanim przystąpisz do zdejmowania soczewek upewnij się, że soczewka znajduje się na środku oka.

Możesz przekonać się o tym, zasłaniając drugie oko i sprawdzając czy widzisz ostro. Zamazany obraz świadczy o przemieszczeniu soczewki na białkówkę albo o wypadnięciu jej poza oko.

Aby zlokalizować soczewkę, unieś górną powiekę i obejrzyj w lusterku górną część oka, a następnie odciągnij dolną powiekę i sprawdź dolną jego część.

Gdy znajdziesz soczewkę, możesz zdjąć ją stosując metodę, szczyknięcia lub inną, zalecaną przez specjalistę.



Metoda szczygnięcia

1. Spójrz w górę i palcem wskazującym zsuń soczewkę do dolnej białej części oka.
2. Delikatnie „szczypnij” soczewkę palcem wskazującym i kciukiem. Wyjmij soczewkę.

Dbanie o soczewki

Dla długotrwałego, bezpiecznego i komfortowego użytkowania soczewek kontaktowych, ważne jest stosowanie się do zaleceń specjalisty.

***NIE UŻYWAJ płynów do soczewek kontaktowych z tym produktem.
Nie testowano soczewek 1•DAY ACUVUE® TruEye™ z płynami.***

Soczewki raz wyjęte, powinny zostać wyrzucone. Nieprzestrzeganie zalecanego schematu pielęgnacji soczewek kontaktowych może spowodować poważne powikłania oczu, wymienione w części „Co należy wiedzieć o noszeniu soczewek kontaktowych”.



Zapas soczewek

Bardzo ważne jest posiadanie odpowiedniej, rezerwowej ilości soczewek na wymianę.

Upewnij się że zawsze posiadasz odpowiednią ilość soczewek. Aby zapobiec nagłemu brakowi soczewek, należy zawsze wcześniej zamówić je i odebrać od specjalisty.

Jeśli z jakiegoś powodu zabraknie Ci soczewek, to powinieneś założyć swoje okulary.

Monowizja

Jeśli specjalista zaleci korekcję wzroku metodą monowizji należy zwrócić uwagę na poniższe aspekty.

Jak w przypadku innych metod korekcji wzroku, monowizja może być pewnym kompromisem.

W pewnych przypadkach pacjenci mogą nie uzyskać maksymalnej poprawy ostrości wzroku albo do dali, albo do bliży. Niektórzy pacjenci stosujący metodę monowizji mogą zaobserwować ograniczenia widzenia stereoskopowego (postrzeganie głębi), niektórzy mogą mieć trudności z przystosowaniem się do tego zjawiska.

Objawy adaptacyjne w postaci nieznacznie zatartego lub zmiennego widzenia, mogą minąć szybko lub utrzymywać się kilka tygodni zanim Twoje oczy przystosują się. Im dłużej trwają objawy, tym mniejsza szansa na skuteczną adaptację.

W pierwszym okresie zaleca się noszenie soczewek w znanym otoczeniu bez szczególnych wymagań ostrości widzenia. Na przykład lepiej nie prowadzić samochodu do czasu, aż oczy przyzwyczają się.

Niektórzy pacjenci mogą potrzebować dodatkowych okularów korekcyjnych noszonych na soczewki kontaktowe, aby uzyskać możliwie najostrzejszy obraz, gdy wymagana jest szczególna precyzja widzenia.

- Niektórzy pacjenci nigdy nie będą w pełni zadowoleni z jakości widzenia w gorszym oświetleniu, np. podczas prowadzenia samochodu nocą. W takich przypadkach można otrzymać dodatkowe soczewki zapewniające korekcję obu oczu do dali, gdy konieczne jest ostrzejsze widzenie dali.
- Decyzja o zastosowaniu monowizji zawsze powinna być podjęta po wszechstronnych konsultacjach ze specjalistą.
- Bardzo ważne jest, żebyś przestrzegał wskazówek specjalisty ułatwiających adaptację do monowizji. Przedyskutuj z nim wszelkie wątpliwości oraz omów problemy, jakie mogą pojawić się podczas lub po okresie adaptacyjnym.

Samokontrola

Co najmniej raz dziennie powinieneś przeprowadzić prosty test.

Zadaj sobie następujące pytania:

- 1 Jak się czuję w moich soczewkach?
- 2 Jak wyglądają moje oczy?
- 3 Czy nadal dobrze widzę?

Powinieneś natychmiast zdjąć soczewki, jeżeli stwierdzisz któryś z następujących problemów:

- Swędzenie, pieczenie czy szczypanie oczu.
- Uczucie ciała obcego w oku.
- Nadmierne łzawienie, wydzielinę, zaczerwienienie oka.
- Rozmycie obrazu, tęcza lub obwódki wokół przedmiotów.
Suchość oczu może pojawiać się jeśli soczewki noszone są zbyt długo.
- Gorsza niż wcześniej tolerancja soczewki.

Jeśli dyskomfort i inne dolegliwości ustąpią po zdjęciu soczewki, sprawdź czy nie jest ona uszkodzona, brudna, czy nie ma na niej obcego ciała. Jeśli tak, to wyrzuć tę soczewkę i załóż świeżą.

Jeśli problem utrzymuje się, zdejmij soczewkę i niezwłocznie skonsultuj się ze swoim specjalistą.

Każdy z wymienionych objawów może wskazywać na poważne schorzenie, takie jak infekcja czy owrzodzenie rogówki. Wczesna diagnoza i szybkie leczenie są konieczne do uniknięcia poważnych uszkodzeń oczu.

**PAMIĘTAJ! ZMIANY SĄ SYGNAŁEM OSTRZEGAWCZYM.
JEŚLI MASZ WĄTPLIWOŚCI, ZDEJMIJ SOCZEWKI.**

Inne ważne informacje

Środki ostrożności

- Przed opuszczeniem gabinetu powinieneś umieć sprawnie zdjąć swoje soczewki.
- Zdejmij natychmiast soczewki, gdy Twoje oczy zaczerwienią się lub ulegną podrażnieniu.
- Zawsze informuj lekarza, że nosisz soczewki kontaktowe.
- Zawsze poradź się specjalisty przed użyciem jakichkolwiek kropli do oczu.
- Niektóre leki, np. antyhistaminowe, obkurczające śluzówki, moczopędne, obniżające napięcie mięśniowe, uspokajające i zapobiegające chorobie lokomocyjnej, mogą powodować suchość oczu, nieostre widzenie lub zwiększać czucie soczewki w oku. W takich przypadkach specjalista powinien zalecić odpowiednie środki przeciwdziałające.
- **Jeśli jakiegokolwiek środki chemiczne dostaną się do oczu: NATYCHMIAST OBFICIE PRZEMYJ OCZY BIEŻĄCĄ WODĄ I BEZZWŁOCZNIE SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM SPECJALISTĄ LUB UDAJ SIĘ DO SZPITALA NA OSTRY DYŻUR.**
- U kobiet przyjmujących doustne środki antykoncepcyjne podczas noszenia soczewek kontaktowych mogą wystąpić zaburzenia widzenia lub gorsza tolerancja soczewek. Specjalista poradzi jak rozwiązać ten problem.
- Tak jak w przypadku noszenia wszystkich innych soczewek regularne wizyty kontrolne są niezbędne do utrzymania zdrowia oczu.

- Nigdy nie pozwalaj nikomu innemu nosić Twoich soczewek. Soczewki zostały przepisane specjalnie dla Twoich oczu i po to, aby poprawić Twoje widzenie. Dzielenie się soczewkami znacząco zwiększa ryzyko infekcji oczu.
- Dla zdrowego, komfortowego widzenia niezbędne jest noszenie soczewek kontaktowych 1•DAY ACUVUE® TruEye™ zgodnie z zaleceniami specjalisty. Są to soczewki jednorazowego użycia, służące do noszenia dziennego. Niniejsza instrukcja powinna służyć do przypominania tych zaleceń.
- Specjalista musi być poinformowany o historii Twoich chorób i powinien zarekomendować system odpowiadający Twoim potrzebom.
- Po zakończeniu zalecanego przez specjalistę okresu wymiany, soczewki 1•DAY ACUVUE® TruEye™ powinny być wyrzucone i zastąpione nową, sterylną parą.
- Zapytaj specjalistę o noszenie soczewek kontaktowych w czasie pływania i uprawiania sportów wodnych. Kontakt soczewki z wodą w czasie pływania oraz podczas kąpieli w wannie może zwiększyć ryzyko infekcji oczu.
- Unikaj wszelkich szkodliwych lub drażniących dymów i oparów podczas noszenia soczewek.
- Zawsze informuj swego pracodawcę że nosisz soczewki kontaktowe. Niektóre prace wymagają używania wyposażenia ochronnego oczu lub mogą wymagać nie noszenia soczewek.
- Jeśli masz jakiegokolwiek wątpliwości, zawsze pytaj swojego specjalistę.

Podsumowanie

W przypadku noszenia jakichkolwiek soczewek kontaktowych muszą być przestrzegane podstawowe zasady ochrony i poprawy wzroku.

- Zawsze przestrzegaj instrukcji bezpiecznego noszenia soczewek. Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne dla utrzymania jakości widzenia i zdrowia.
- Wysokie standardy higieny są niezbędne.
- NIGDY nie noś soczewek dłużej niż przez zalecony okres.
- NIGDY nie używaj wody z kranu do spłukiwania soczewek.
- Jeśli wystąpią problemy, takie jak zaczerwienienie, podrażnienie oka, zamazane widzenie NATYCHMIAST zdejmij soczewki i skontaktuj się ze specjalistą.
- Zawsze miej przy sobie okulary, abyś nigdy nie był zmuszony nosić soczewki, gdy nie powinieneś. Jeśli soczewki kontaktowe są Twoją podstawową metodą korekcji wzroku, okulary powinny być niezbędnym zabezpieczeniem.

Jako użytkownik soczewek kontaktowych 1•DAY ACUVUE® TruEye™ wkrótce przekonasz się o ich przewadze nad okularami i innymi soczewkami kontaktowymi.

W celu osiągnięcia maksymalnych korzyści ze stosowania soczewek kontaktowych najważniejsze jest przestrzeganie zaleceń specjalisty oraz zasad zawartych w niniejszej Instrukcji.

Zawsze postępuj zgodnie z zaleceniami specjalisty i informacjami zawartymi w tej instrukcji.

Reakcje odrzucenia

O wszelkich niepokojących objawach występujących w trakcie noszenia soczewek kontaktowych 1•DAY ACUVUE® TruEye™ zawsze powinien być poinformowany Twój specjalista.

Karta kontrolna

1•DAY ACUVUE® TruEye™

Prawa soczewka

moc i promień krzywizny

Lewa soczewka

moc i promień krzywizny:

**PO WYJĘCIU Z OKA SOCZEWKI POWINNY
BYĆ WYRZUCONE.**

**JEŚLI MASZ JAKIEKOLWIEK PYTANIA CZY WĄTPLIWOŚCI,
SKONTAKTUJ SIĘ ZE SWOIM SPECJALISTĄ.**

Adres i numer telefonu specjalisty

Regularne wizyty kontrolne są bardzo ważne dla zachowania zdrowia oczu.

Twoje wizyty kontrolne

1
2
3
4
5
6

Niniejszym oświadczam,
że poinstruowano mnie,
w zakresie zasad i okresów
używania soczewek kontaktowych,
a w szczególności soczewek
firmy Johnson & Johnson.
Zobowiązuję się do ich
przestrzegania, a wszelkie
odstępstwa biorę na swoją
odpowiedzialność.

Imię

Nazwisko

Podpis

Data

Autoryzowany przedstawiciel w Unii Europejskiej:
Johnson & Johnson Vision Care,
oddział Johnson & Johnson Medical Limited, The Braccans,
London Road, Bracknell, Berkshire RG12 2AT, United Kingdom.

1•DAY ACUVUE® i TruEye™ są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy
Johnson & Johnson Vision Care, oddział Johnson & Johnson Poland Sp. z o.o. © JJVC 2009.

Johnson & Johnson
Vision Care

ul. Iłżecka 24
02-135 Warszawa

Kwiecień 2009